


Guía pruebas rápidas del medidor CONTOUR

Sistema de Control de Glucosa en Sangre CONTOUR® de Bayer COMPLETO Y FÁCIL

Pruebas de Glucosa en Sangre en 2 Pasos Sencillos

1

Inserte una Tira Reactiva CONTOUR® en el medidor. Se encenderá el medidor e inmediatamente aparecerá en la pantalla la imagen de una gota de sangre intermitente. El medidor está listo para que usted aplique una pequeña (0.6µl) muestra de sangre.

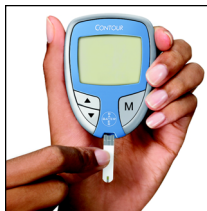


2

Toque suavemente la punta de la tira reactiva con la gota de sangre hasta que el medidor emita un sonido. La innovadora tecnología Sip-in Sampling® del medidor CONTOUR permite que la sangre llene la tira reactiva. El resultado de su prueba se visualizará luego de una rápida cuenta regresiva de cinco segundos.



Lea el resultado, retire y deseche la tira reactiva usada. La medición se almacenará en forma automática en la memoria y el medidor se apagará automáticamente.

Para obtener más información sobre los productos y servicios de Bayer, visite www.BayerDiabetes.com

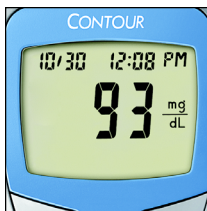

PRECISIÓN SIMPLE. SOLUCIÓN DE BAYER.

0392250

Guía pruebas rápidas del medidor CONTOUR


El medidor CONTOUR® tiene funciones inteligentes optativas que hacen fácil mantenerse controlado.

Los marcadores rápidos y fáciles de comidas de CONTOUR ayudan a completar el cuadro de control de azúcar en sangre.

1a

Cómo marcar los resultados de las pruebas*

Marcado del resultado de una prueba como anterior a una comida: cuando el resultado de la prueba aparece en la pantalla, presione ▲ o ▼ para desplazarse al cuadro intermitente alrededor del marcador 🍏 y presione **M** para configurarlo.

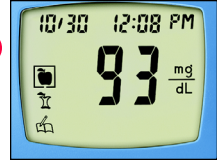

1b

Configuración de la alarma del recordatorio de prueba:

si marca un resultado con la 🍏, aparecerá el 🕒 con un cuadro intermitente alrededor. Esto le permite configurar una alarma que sonará* a las 2 1/2 horas, para recordarle que realice una prueba después de la comida. Presione **M** para configurar la alarma.



2

Marcado de una prueba como posterior a una comida:

cuando aparece el resultado de la prueba en la pantalla, presione ▲ o ▼ para desplazarse hacia el cuadro intermitente alrededor del marcador 🍷 y presione **M** para configurar.



3

Marcado de una prueba como única: algunas veces se realiza pruebas únicas de azúcar en sangre y no pruebas en base a una comida. Cuando el resultado de su prueba aparece en la pantalla, presione ▲ o ▼ para desplazarse al cuadro intermitente alrededor del marcador 📅 y presione **M** para configurarlo. Puede anotar este resultado en su Diario CLINILOG®.



Luego de marcar el resultado de la prueba con el marcador de comidas correcto, retire la tira para apagar el medidor y desechar la tira utilizada.

En caso de surgirle alguna duda, remítase a la Guía del usuario del sistema de control de glucosa en sangre de CONTOUR para obtener las instrucciones completas acerca del uso y demás información de importancia.

El servicio de atención al cliente de Bayer le brinda asistencia personal cuando usted la necesita. **Lláme al 1-800-348-8100.**

* Deberá activar la función Marcador de comidas en su medidor CONTOUR antes de marcar los resultados de sus pruebas. Remítase a la página 24 de la Guía del usuario de CONTOUR para obtener las instrucciones.

